



# STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO SEBETESTOVÁNÍ

V-CHEK™ Souprava pro rychlé testování antigenu 2019-nCoV  
(Imunochromatografie)

## SOUČÁSTI TESTU



1. Výtěrová tyčinka



2. Rapid Test Card = Testovací karta



3. Zkumavka s pufrem



4. Pracovní stojánek

## PŘED TESTOVÁNÍM

- Testovací kazeta musí mít před použitím pokojovou teplotu.
- Testovací kazetu vyndejte z obalu až těsně před použitím.
- Položte kazetu na rovný povrch.

## ODBĚR VZORKU

1. Hlavičku výtěrové tyčinky zasuňte do levé nosní dírky (2-3 cm) a nejméně 5krát otočte proti stěně nosní dírky.
2. Vyjměte výtěrovou tyčinku z nosu a poté ji zasuňte do pravé nosní dírky (2-3 cm) a nejméně 5krát otočte proti stěně nosní dírky.
3. Vyjměte výtěrovou tyčinku z nosu.



## ZPRACOVÁNÍ VZORKU


Pro snadnější manipulaci se zkumavkou použijte pracovní stojánek.

1. Odšroubujte kapátko ze zkumavky s pufrem.
2. Ponořte hlavičku výtěrové tyčinky se odebraným vzorkem do zkumavky s pufrem a 10krát jí otočte, a přitom stlačujte spodní část zkumavky.
3. Vyjměte výtěrovou tyčinku ze zkumavky a současně stlačte boky zkumavky, aby se z hlavičky tyčinky extrahovala kapalina se vzorkem.
4. Na zkumavku našroubujte víčko s kapátkem.
5. Odlomte špičku kapátka.



## POSTUP PROVEDENÍ TESTU

1. Přidejte 3 kapky zpracovaného vzorku do jamky na vzorek a začněte měřit čas.
2. Test se spustí, jakmile se ve výsledkovém okénku uprostřed karty začne pohybovat fialová barva.

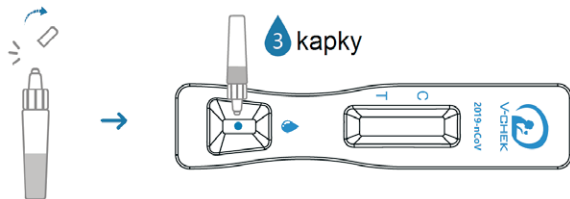


## VYHODNOCENÍ TESTU

### Výsledek odečtete po 15 minutách.

Odečtení výsledku po méně než 15 minutách, může vést k nesprávně negativnímu výsledku.

Odečtení výsledku po více než 20 minutách, může vést k nesprávně pozitivnímu výsledku.

Jakákoliv sytost zabarvení (i slabé) testovací linie T znamená pozitivní výsledek.

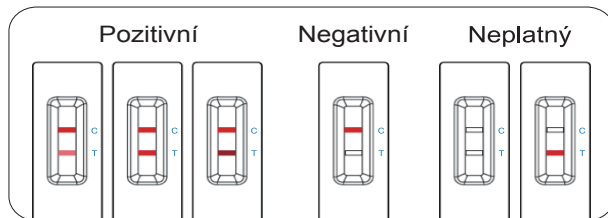

Pokud je výsledek neplatný, nebyl test provedený správně nebo je poškozený. Znovu si pozorně přečtete návod k použití a test opakujte s novou testovací kazetou.

Uživatel by neměl činit jakékoliv závěry o zdravotním dopadu získaných výsledků, aniž by tyto výsledky nejdříve konzultoval se svým lékařem.

Je-li diagnostický zdravotnický prostředek in vitro pro sebetestování použit pro sledování existující nemoci, pacient může pozměnit způsob léčby pouze tehdy, pokud byl v tomto smyslu náležitě proškolen.

## UPOZORNĚNÍ

Testovací karty a výtěrové tampóny nepoužívejte opakovaně. Použité součásti testu vyhodte do komunálního odpadu.



### Původní (originální) výrobce:

Guangzhou Decheng Biotechnology Co., LTD  
Room 218, Building 2, No.68, Nanxiang Road, Science City,  
Huangpu District, 510000, Guangzhou P.R.China



Caretechion GmbH  
Niederrheinstr. 71, 40474  
Duesseldorf, Germany



### Nový výrobce:

QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.  
Korytná 47, 100 00 Praha 10, Česká republika  
info@quickseal.eu  
+420 273 167 580  
www.quickseal.eu  
f quickseal.eu

© 2021 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o.  
Použití obrázků a textů není bez předchozího  
souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena.



QuickSeal